

Gebrauchsinformation

Applikationshilfe für Augentropfen und Augensalben



Eyot®



Hersteller

Spruyt hillen bv
Tinbergenlaan 1
NL-3401 MT IJsselstein
Tel +32 (0)30-2814411

Eyot® ist eine registrierte
Schutzmarke.

Version Mai 2015

Vertrieb:

Fagron GmbH & Co. KG
Wilhelm-Bergner-Straße 11 g
D- 21509 Glinde
Tel.: +49 (0)40 670 67 5
fagron.de



Reinigung

Nach dem Gebrauch Eyot® sofort mit kaltem Wasser abspülen und mit einem sauberen Tuch trocknen; staubfrei aufbewahren. Eyot® nicht auskochen, nicht in der Spülmaschine reinigen und nicht für andere Zwecke verwenden. Aus hygienischen Gründen auch nicht von anderen Anwendern mitbenutzen lassen.




Produkteigenschaften

Eyot® ist ein universelles Hilfsmittel zum Einbringen von Augentropfen, das ausschließlich in Kombination mit eindrückbaren Augentropfenfläschchen und Augensalben-tuben aus Kunststoff verwendet werden kann. Augentropfenfläschchen aus Glas oder aus Hartplastik können nicht mit Eyot® kombiniert werden.

Verwenden Sie mit Eyot® nur Augentropfenfläschchen, deren Flaschenspitze zwischen 8 und 14 Millimeter lang ist.

- Eyot® ist aus wiederverwendbarem, thermoplastischem Kunststoff hergestellt.
- Eyot® entspricht der EC-Richtlinie 93/42 für Medizinprodukte der Klasse 1.

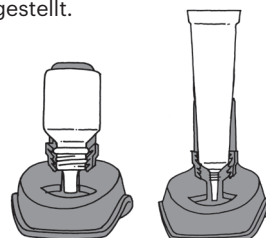

Anwendung

Eyot®



1


Waschen Sie Ihre Hände und setzen Sie sich auf einen Stuhl mit einer nicht allzu hohen Rückenlehne.



4


Kippen Sie die Oberkante des Eyot® bis auf Ihre Augenbraue.

Die Flaschenspitze/Tubenspitze sollte sich jetzt genau vor Ihrem Auge befinden.

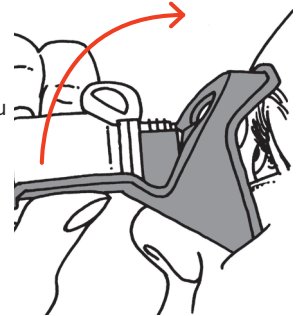


2

Drehen Sie die Verschlusskappe von dem Fläschchen/der Tube. Schieben Sie das Fläschchen/die Tube in das Eyot®.

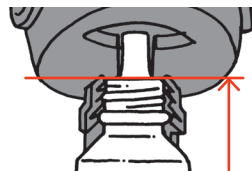

Fläschchen

Stecken Sie die Flaschenspitze/Tubenspitze ganz in die Öffnung des Eyot®, ohne die Fläschchen- bzw. Tubenspitze zu berühren.

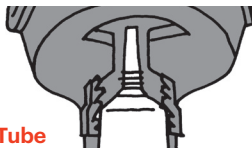

Tube

5

Legen Sie den Kopf in den Nacken und schauen Sie durch die obere Öffnung des Eyot®, bis Sie die Zimmerdecke senkrecht über sich sehen.



3

Setzen Sie das Eyot® unter Ihr Augenlid und ziehen Sie Ihr Augenlid damit vorsichtig nach unten, sodass das Eyot® auf Ihrem Jochbein ruht.



6

Durch Drücken auf das Fläschchen/die Tube bringen Sie die Tropfen/die Salbe in das Auge ein.

Nehmen Sie das Fläschchen/die Tube aus dem Eyot® und drehen Sie die Verschlusskappe wieder auf das Fläschchen/die Tube.

