



Customer  
solution

# Eyot<sup>®</sup> – Tropfhilfe

## Einfach und effektiv

# Was ist Eyot®?

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Apotheke vor Ort.

Eyot® ist eine Tropfhilfe für die richtige und sichere Anwendung eindrückbarer Augentropfenflaschen, Augensalben/-geltuben sowie für Einzeldosisverpackungen (EDO).




## Für wen ist Eyot® geeignet?

Eyot® ist für alle Patienten geeignet, die Augentropfen verwenden.


Erfahrungen zeigen, dass es oft schwierig ist, Augentropfen in das eigene Auge zu tropfen. Bei den meisten Patienten treten bei der Verabreichung von Augentropfen folgende Probleme auf:

- Nervosität bei der Verabreichung der Augentropfen
- Zittern der Hände
- Schwierigkeiten beim Zusammendrücken der Flasche
- Eingeschränktes Sehen
- Angst, dass die Flasche das Auge berührt
- Tropfen verfehlt das Auge aufgrund falscher Positionierung der Flasche

## Wie wende ich Eyot® an?

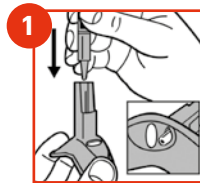

**1.** Waschen Sie Ihre Hände und setzen Sie sich auf einen Stuhl mit niedriger Rückenlehne. Öffnen Sie die Verpackung und stecken Sie die Flasche/Tube in das Eyot®/ Minim Eyot®.

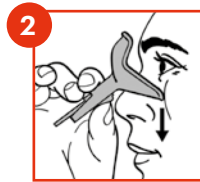

**2.** Setzen Sie Eyot®/ Minim Eyot® unter das Augenlid und ziehen Sie das Augenlid vorsichtig nach unten.



**3.** Setzen Sie den oberen Teil des Eyot®/ Minim Eyot® auf die Augenbraue.



**4.** Neigen Sie Ihren Kopf nach hinten bis die Sichtöffnung des Eyot®/Minim Eyot® senkrecht über Ihnen ist. Ihr Kopf ist jetzt in der richtigen Position. Das Medikament kann nun ins Auge getropft werden.

## Vorteile von Eyot®:

- ✓ Mit einer Hand bedienbar
- ✓ Erleichtert die Verabreichung durch eine optimale Tropfposition
- ✓ Für Sehbehinderte geeignet
- ✓ Verletzungsgefahr minimiert
- ✓ Hygienische Anwendung der Augenmedikamente



# Eyot® für Augentropfen, Augensalben und Augengele

In zwei Varianten erhältlich:



## Eyot®

- für Flaschen
  - für Tuben
- PZN: 16226025



## Minim Eyot®

- für Einzeldosis-  
verpackungen (EDO)
- PZN: 16226019



## Gemeinsam

gestalten wir die Zukunft  
personalisierter Medizin



**Fagron GmbH & Co. KG**  
Wilhelm-Bergner-Straße 11 g  
D-21509 Glinde

Tel.: +49 (0) 40 – 670 67 5  
Mail: [info@fagron.de](mailto:info@fagron.de)  
Web: [fagron.de](http://fagron.de)

**Fagron**  
personalizing  
medicine