


SyrSpend® SF

Reinigungshinweis für die Dosierhilfe

Nach jeder Anwendung muss die Dosierhilfe, wie beispielsweise eine Oralspritze, gründlich mit lauwarmem Wasser gereinigt und anschließend getrocknet werden. Zur Sicherstellung einer hygienisch einwandfreien Einnahme, muss die Dosierhilfe alle sieben Tage gegen eine Neue ausgetauscht werden.


Eine gründliche Reinigung der Oralspritze und des Tip-Extenders (Spritzenaufsatz) ist wichtig, um das Arzneimittel nicht zu verunreinigen und eine hygienisch einwandfreie Einnahme sicherzustellen.

Bitte folgen Sie den Anweisungen Ihres Arztes oder Apothekers zur genauen Anwendung.

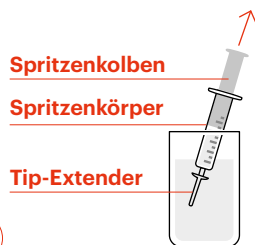


- 1 Zur Reinigung füllen Sie die Spritze mit lauwarmem Leitungswasser oder mit handwarmem, abgekochtem Wasser.

Sollten Sie zur Einnahme den Tip-Extender (Spritzenaufsatz) verwendet haben, belassen Sie diesen bitte auf der Spritze.

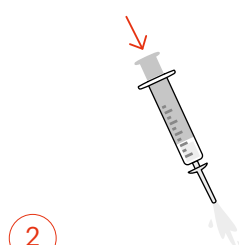


- 2 Drücken Sie die Spritze aus. Falls Sie den Tip-Extender verwendet haben, so lassen Sie diesen auf der Spritze stecken.

Wiederholen Sie diesen Vorgang 1 bis 3 Mal, bis das Wasser klar ist und sich keine Rückstände des Arzneimittels mehr in der Spritze befinden.

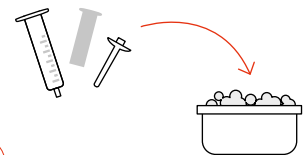


- 3 Ziehen Sie den Spritzenkolben aus dem Spritzenkörper. Sollten Sie den Tip-Extender verwendet haben, entfernen Sie diesen ebenfalls vom Spritzenkörper.

Reinigen Sie alle Bestandteile in lauwarmem Wasser mit einem milden Spülmittel.

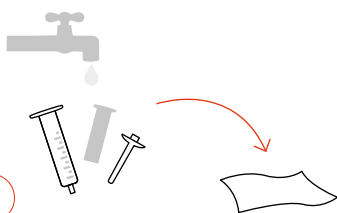

- 4 Spülen Sie anschließend alle Bestandteile der Spritze mit kaltem Leitungswasser aus, und trocknen Sie diese gründlich mit herkömmlichen Haushaltstüchern.

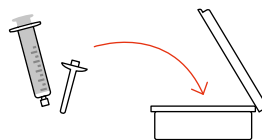

- 4 Nach dem Trocknen fügen Sie alle Teile der Spritze wieder zusammen. Bewahren Sie die Spritze an einem sauberen und trockenen Ort auf.



- 5 Entsorgen Sie die Spritze (und den Tip-Extender) maximal 7 Tage nach dem ersten Gebrauch.

Die Spritze sollte umgehend ersetzt werden, wenn der Spritzenkolben schwergängig wird und/oder wenn die Masseinheiten auf der Spritze unlesbar geworden sind.